

Opdateret information fra laboratorierne omkring Henteordningen

Kære praksis.

Hermed en opdateret beskrivelse i forhold til forsendelse, rørtyper, pakning af prøverør og analysekrav.

Analysér som ikke kan tages i praksis:

På baggrund af holdbarhed og centrifugeringskrav kan praksis ikke udføre venepunktur til følgende analyser:

Homocystein	(Hcy)
Calcium-ion(frit)(pH=7,40)	(Ca-ion)
Zink	(Zink)

Patienter med ovenstående analysebehov henvises fremover til blodprøvetagningsambulatorierne.

Rørtyper.

Se vedlagte vejledning angående rørtyper og bestillingsnumre samt, hvordan rørene skal behandles.

WebReq rekvisitionens anvisninger skal følges. Stregkoderne i højre side af rekvisitionerne skal sættes på prøverørene umiddelbart inden prøvetagning.

Registreringstidspunkt og holdbarhed for prøvemateriale.

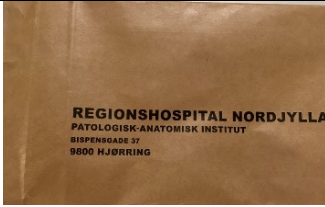
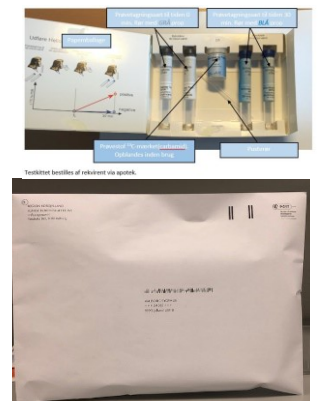
For at kunne sikre kvalitetskravet til prøverne, er det nødvendigt, at **rekvisitionen printes umiddelbart i forbindelse med prøvetagningen.**

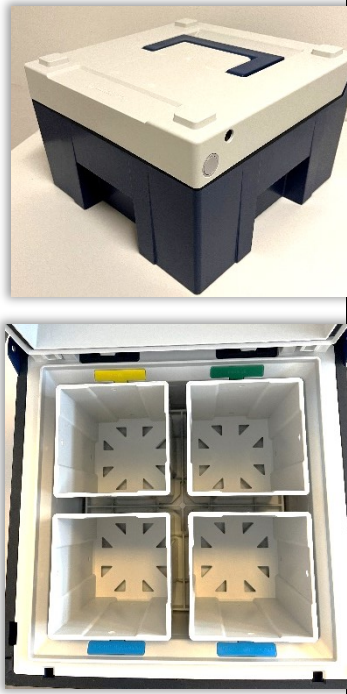
Dette sikrer, at **prøvens prøvetagningstidspunkt registreres korrekt.**

Hvis prøvetagnings-tidspunktet ikke er korrekt registreret risikeres, at prøven overskrider de fastsatte holdbarhedskriterier og dermed ikke analyseres.

Vejledninger.

Efterfølgende sider er illustrative visninger af forsendelsesemballage med oplysninger om opbevaring og forsendelse af prøver, som skal analyseres på Klinisk Biokemiske Afdelinger(KBA), Klinisk Immunologisk Afdeling(KIA), Klinisk Mikrobiologisk afdeling(KMA) og Patologiske Institutter.

Labo- ratorie	Forsendelsesemballage	Beskrivelse	Opbevarings- temperatur	Bestillings- nummer
PAI RHN		Prøvekuvert til prøver som sendes til: Regionshospital Nordjylland, Patologisk-anatomisk institut I prøvekuverter må der ikke medsendes prøver til hospitalets andre laboratorieafdelinger.	Klimaskab ved 20-22 °C	199695
PA AAUH		Prøvekuvert til prøver som sendes til: Aalborg Universitetshospital Patologiskafdelingen I prøvekuverter må der ikke medsendes prøver til hospitalets andre laboratorieafdelinger. Kuvert påføres afsender	Stuetempera- tur	199942
KMA		Stødabsorberende forsendelsesæsker påsat etiket til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. I prøvekuverter må der ikke medsendes prøver til hospitalets andre laboratorieafdelinger.	2-8 °C indtil forsendelse UNDTAGET Skrab for hud- og neglesvamp - stuetempera- tur	Æske 290120 Etiket 000394
KMA		Til forsendelse af prøver til undersøgelse for Tarmpatogene bakterier og parasitter (fæces laboratoriet) anvendes portofrigjorte prøvekuverter I prøvekuverter må der ikke medsendes prøver til hospitalets andre laboratorieafdelinger.	2-8 °C indtil forsendelse	099401
KMA		Ved indsendelse af ekspektorat i ”dåse” anvendes en ufrankeret prøvekuvert påstemplet ” IKKE portofrigjort”, påsat etiket til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling I prøvekuverter må der ikke medsendes prøver til hospitalets andre laboratorieafdelinger.	2-8 °C indtil forsendelse	Kuvert 099404 Etiket 000394
KBA AAUH		Helicobacter pylori (pusteprobe) Prøvekit bestilles via apoteket	Stuetempera- tur	Kuvert med patient- vejledning (10 stk) 516699

Labo- ratorie	Forsendelsesemballage	Beskrivelse	Opbevarings- temperatur	Bestillings- nummer
KBA RHN		Transportkasse med 2 gule skumindsatser til KBA i Hjørring og Frederikshavn. I denne kasse må kun sættes prøverør, som skal analyseres på KBA og KIA.	Klimaskab ved 20-22 °C	
KBA, KMA og PAI AAUH		Transportkasse med 4 beholdere indikeret med farvede brikker Blå 2 stk. til KBA Gul 1 stk til KMA Grøn 1 stk til PAI Beholderne til KBA opbevares i klimaskab indtil forsendelse Beholderen til KMA opbevares i køleskab indtil forsendelse Kassen med beholder til PAI opbevares på bord ved stuetemperatur Inderkasse og yderkasse lukkes med låg.		
KBA Thisted		Transportkasse med 2 gule skumindsatser til KBA i Thisted I denne kasse må kun sættes prøverør, som skal analyseres på KBA og KIA I transportkassen skal skumindsatsene og rack med prøver placeres på absorberende indlæg.	Klimaskab ved 20-22 °C	

Breve, forsendelsesæsker og boblekuverter.



Regionshospitalet Nordjylland + Thisted

Breve, forsendelsesæsker og boblekuverter placeres altid ovenpå transportkassen. Der må **ikke** lægges kuverter og breve i kassen.



Aalborg Universitetshospital

Prøver taget efter 2. afhentning



**Klinisk Biokemisk Afdeling
prøver taget efter
2. afhentning
ankomst til KBA dagen efter**

Det præciseres, at prøvetagning efter 2. afhentning kan have betydning for analyse-resultatet. Vi henstiller til, at alle prøver tages og sendes med afhentningsordningen samme dag.

I særlige tilfælde, hvor prøvetagning er nødvendig, behandles prøverne af praksis i forhold til kriterierne for centrifugering, afpipettering mm.

Se www.laboratorievejledning.rn.dk for prøvebehandling og holdbarhed.

Prøver, taget efter 2. afhentning, pakkes i prøvekuvert (varenr. 099404) med tilhørende etikette (varenr 000402), og sendes med af-hentningsordningen efterfølgende dag.

VIGTIGT: Disse prøverør må under ingen omstændigheder blandes med prøverør, som kommer rettidigt med afhentnings-ordningen

Er der spørgsmål til ovenstående er I velkomne til at kontakte de laboratoriefaglige konsulenter på de Klinisk Biokemiske afdelinger i Regionen:

**Regionshospital Nordjylland, Klinisk Biokemisk afdeling,
Hjørring og Frederikshavn**

Laboratoriefaglige konsulent:

Claus Woldum clw@rn.dk Tlf. 9764 1201

Aalborg Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling

Laboratoriefaglige konsulent i Aalborg og Thisted:

Britta Storvang brst@rn.dk Tlf. 2054 7787