

Klimaskabe

Skabets temperatur aflæses hver morgen inden ibrugtagning.

(Efter gentagne åbne/luk kan temperaturen svinge afhængig af rumtemperaturen)

Temperatur(morgen) skal være $21,0\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1,0\text{ }^{\circ}\text{C}$

Temperatur og tidspunkt for aflæsning, samt initialer på den, der har aflæst, skrives i skema "Aflæsning klimaskabe 2024"

Hvis temperaturen afviger fra dette, kontaktes kørselsleder Per Juul tlf. 2014 3593 med henblik på udredning af problemet.

Er temperaturen $<20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ og $>22,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ kan skabet ikke anvendes til opbevaring af blodprøver, og kørselslederen kontaktes for aftale om akut ombytning af skabet. Der kan ikke foretages blodprøvetagning før klimaskabets temperaturfejl er udbedret. Har der været opbevaret blodprøver i klimaskabet, når temperaturfejl registreres, kontaktes laboratoriekonsulenten

Kilde: "Stability of heparin blood samples during transport based on defined preanalytical quality goals" 2008 E.A. Jensen, M. Stahl, I. Brandslund and P. Grindsted